

## INSTRUKCJA POBIERANIA I PRZESYŁANIA NIEODWIROWANEJ KRWI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W MOBILNYM ZESTAWIE DO KRWI PEŁNEJ



### W skład zestawu wchodzi:

1. Dwie próbowko-strzykawki do pobrania aspiracyjnego;
2. Dwie igły systemowe;
3. Dwie etykiety samoprzylepne do opisania próbek;
4. Styropianowy pojemnik (bez wkładu chłodzącego w okresie zimowym i z wkładem chłodzącym w okresie letnim);
5. Druk zlecenia badań laboratoryjnych.
6. Naklejka handlingowa (UN3373)



### Przygotowanie do badania:

- Próbkę krwi można pobrać o każdej porze dnia. Nie trzeba być na czczo.
- Pobrania krwi powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje (pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, ratownik, lekarz).

### Przebieg pobrania materiału i procedura wysyłki próbki:



1. Po zdezynfekowaniu skóry pobrać krew żylną do jednej próbowko-strzykawki.  
W tym celu:
  - odpakować igłę systemową i nałożyć na strzykawko-probówkę (delikatnie wkręcić igłę do uzyskania stabilnego połączenia jej ze strzykawko-probówką),
  - włożyć się do żyły,
  - aspirować krew do strzykawko-probówki do oporu (pociągnąć tłok strzykawko-probówki do zablokowania się tłoka),
  - zwolnić stazę,
  - zdjąć strzykawko-probówkę z igły,
  - wyjąć igłę z żyły i zabezpieczyć ją,
  - ze strzykawko-probówki odłamać tłok.



2. Wystarczy pobrać krew do jednej z zawartych w zestawie probówek. Drugi komplet (igła + probówko-strzykawka) stanowi rezerwę w przypadku nieudanego pobrania za pierwszym razem. Niewykorzystany komplet prosimy odesłać wraz z materiałem do badań.




3. Nakleić etykietę samoprzylepną z imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL pacjenta oraz datą i godziną pobrania materiału.



4. Czytelnie i dokładnie uzupełnić i podpisać formularz zlecenia badań, wpisać datę i godzinę (dokumenty zostaną przesłane po zakupie badania na podany w zamówieniu adres e-mail). Jeśli nie dysponujesz formularzem zamówienia, możesz pobrać formularz (<https://wielkoszynski.pl/wp-content/uploads/2020/06/FORMULARZ-ZLECENIA-BADANIA.pdf>). Wypełniony formularz z załącznikiem włożyć do torebki strunowej. Całość umieścić w kartonowym pudełku.



5. Przesyłkę należy wysłać pocztą kurierską do Centrum Medycznego Wielkoszyński w dniu pobrania materiału. Próbka krwi w okresie od pobrania do odebrania przez kuriera może być przechowywana w temperaturze pokojowej.

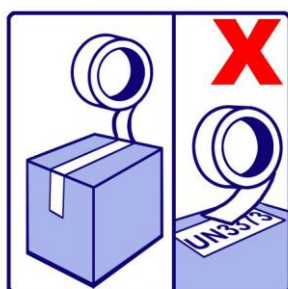

6. W celu wysyłki materiału, zamknąć opakowanie styropianowe (latem umieścić w nim schłodzony wkład) a następnie karton. Nakleić z jednej strony na karton naklejkę handlingową UN3373 dołączoną do zestawu (nie zaklejać jej). List przewozowy nakleić z drugiej strony.



7. W przypadku korzystania z kuriera zamawianego przez Centrum Medyczne Wielkoszyński, wydrukować dokumenty otrzymane drogą mailową od firmy kurierskiej i przekazać kurierowi. Kurier może odebrać przesyłkę od poniedziałku do czwartku.

8. Jeśli nie uda się pobrać krwi, prosimy o pilny kontakt z rejestracją w celu odwołania kuriera.

9. W przypadku nieodebrania przesyłki przez kuriera prosimy o kontakt z rejestracją Centrum Medycznego Wielkoszyński w celu ustalenia sposobu postępowania z materiałem.



10. Czas oczekiwania na wynik badania: do 7 dni roboczych. Wyniki badań odbiera się w serwisie e-wyniki po zalogowaniu do indywidualnego konta Pacjenta. Instrukcja odbioru wyników znajduje się na naszej stronie <https://wielkoszynski.pl> w zakładce "Przed badaniem" w sekcji „Odbiór wyników” oraz w wersji PDF pod adresem: [https://wyniki.wielkoszynski.pl/inst\\_pacjent.pdf](https://wyniki.wielkoszynski.pl/inst_pacjent.pdf)

**W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją Centrum Medycznego Wielkoszyński pod nr tel.: +48 506 112 819, +48 730 300 665.**